

PROTECTOR DE JUANETE



DESCRIPCIÓN

El Protector de Juanete es una almohadilla de **tejido ultra suave con gel interior y separador de silicona**, diseñada para dar alivio y protección en la zona del juanete.





ALIVIA EL DOLOR

Proporciona un masaje constante en las partes blandas y articulaciones, aliviando el dolor producido por el juanete.



AMORTIGUA Y PROTEGE

Su gel protector interior alivia el dolor amortiguando la presión.



ALINEA LA POSICIÓN DE LOS DEDOS

Su diseño y tejido suave ofrecen un ajuste perfecto en el pie y el separador de silicona mantiene alineada la zona interdigital.

MODO DE USO

1

Colocar el protector en el pie, prestando atención que el gel interior cubra la zona prominente del juanete y el separador de silicona entre el primer y segundo dedo del pie.

2

Lavar con agua fría y jabón neutro cuando sea necesario, secar muy bien y espolvorear con talco cuando este completamente seco.




GARANTIA

Contamos con **garantías oficiales** de 6 meses que incluyen los siguientes servicios:

- + Asesoramiento para el uso.
- + Soporte técnico especializado.
- + Respuesta inmediata en caso de mal funcionamiento.



M.D.

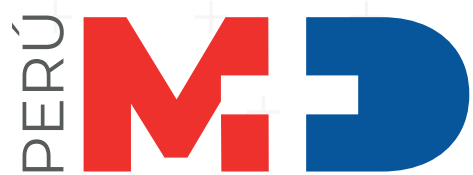

MD Dispositivos Médicos del Perú SAC

Contáctenos

Nuestra meta es asesorarlo de la manera más personalizada posible.



✉ ventas@mdperu.com

☎ +51 960 590 883

🌐 mdperu.com

☎ +51 1 4073376

📍 Av. El Ejército 1148. Edificio Time
Magdalena del Mar- Lima