

STEAMPlus™ Integrador Clase 5 para Esterilización a Vapor

Introducción

El Integrador de esterilización STEAMPlus, es un mecanismo médico de "tecnología avanzada", que proporciona un método simple y preciso para asegurar que las condiciones adecuadas de esterilización se han cumplido durante el ciclo de esterilización. Esta certificado para su uso en todo tipo de autoclaves (gravedad, vacío previo y flash), el STEAMPlus ha documentado un rendimiento equivalente a un indicador biológico.

Descripción

El Integrador de Esterilización está diseñado para integrar las tres variables críticas de la esterilización: tiempo, temperatura y vapor saturado. Esta información se muestra de forma precisa, fácil de leer. Cuando la barra oscura entra en la zona de seguridad azul (SAFE), los criterios de la esterilización se han cumplido correctamente, si la barra oscura no llega a la zona de seguridad azul (SAFE), las condiciones adecuadas para la esterilización no se han alcanzado y la carga procesada no debe ser liberada. El Integrador Clase 5 para Esterilización STEAMPlus cumple las exigencias de performance de AAMI ST-60 e ISO 11140-1:2005. Nota: La FDA no reconoce la clase 3, 4 o 5 en la norma ISO 11140-1:2005.

Como utilizar el Integrador de Esterilización por vapor STEAMPlus™

1. Coloque un Integrador STEAMPlus dentro de cada paquete o en cada carga (en el medio de la carga o dentro del paquete más lleno).
2. Procese la carga, de acuerdo a las instrucciones del fabricante del esterilizador.
3. Libere la carga si la barra oscura en el integrador STEAMPlus ha entrado en la zona de seguridad (SAFE) de color azul. Si la barra oscura no ha entrado en la zona de seguridad (SAFE) azul, **NO** liberar la carga.

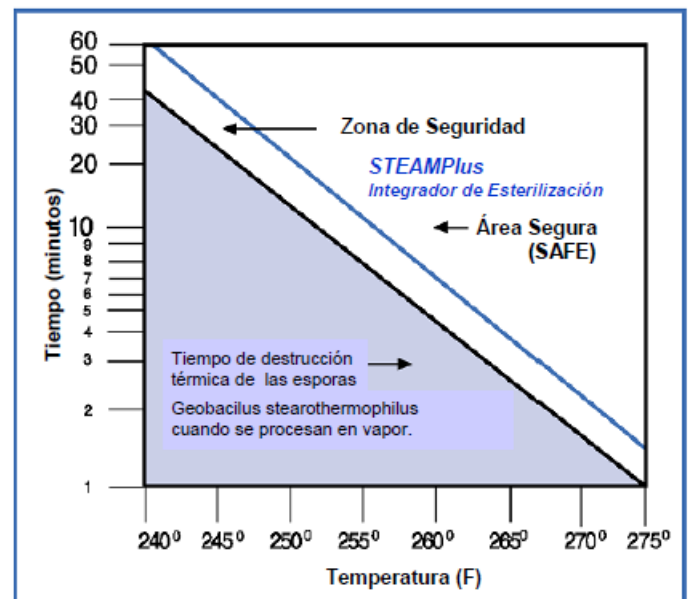


Figura 1

El integrador STEAMPlus no reemplaza el uso semanal de un indicador Biológico, sino que tiene por objeto dar a los usuarios una notificación inmediata de si se han cumplido todos los parámetros críticos en la esterilización por vapor. Este conocimiento tiene la intención de eliminar la liberación de artículos no estériles.

INFORMACION PARA PEDIDOS

No. de catálogo	Descripción	Cantidad
SSI-100	STEAMPlus™ Integrador clase 5	100/bls

SIN PROCESAR



PASÓ



FALLÓ

